
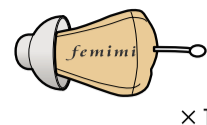
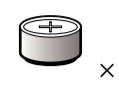
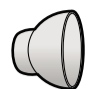
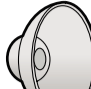


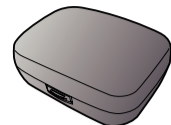

# femimi

## スターガイド

耳あな型デジタル集音器

VR-L50


- ① 本体  
 ×1
- ② お試し用電池  
PR41(312)  
 ×1
- ③ イヤーチップ  
S サイズ  
 ×1
- ④ イヤーチップ  
L サイズ  
 ×1
- ⑤ 収納ケース  
 ×1
- ⑥ お掃除ブラシ  
 ×1
- ⑦ 耳あかガードキット  
 ×1

ご購入時には M サイズのイヤーチップが装着されています。


・取扱説明書(1部)、スターガイド(本書、1部)、注意書(1部)、保証書(1部)

<ご購入いただける部品・付属品について>

| 部品名            | 部品番号      | 部品名              | 部品番号      |
|----------------|-----------|------------------|-----------|
| 空気電池(6個パック)    | GXX1002-A | 耳あかガードキット(8本セット) | GEY1002-A |
| イヤーチップ(3サイズ一式) | GXX1003-A | 収納ケース            | GXK1001-A |
| お掃除ブラシ         | GEY1001-A | スターガイド           | GRA1002-A |

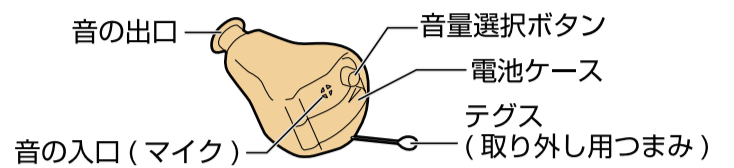


### 耳への着け方・外し方

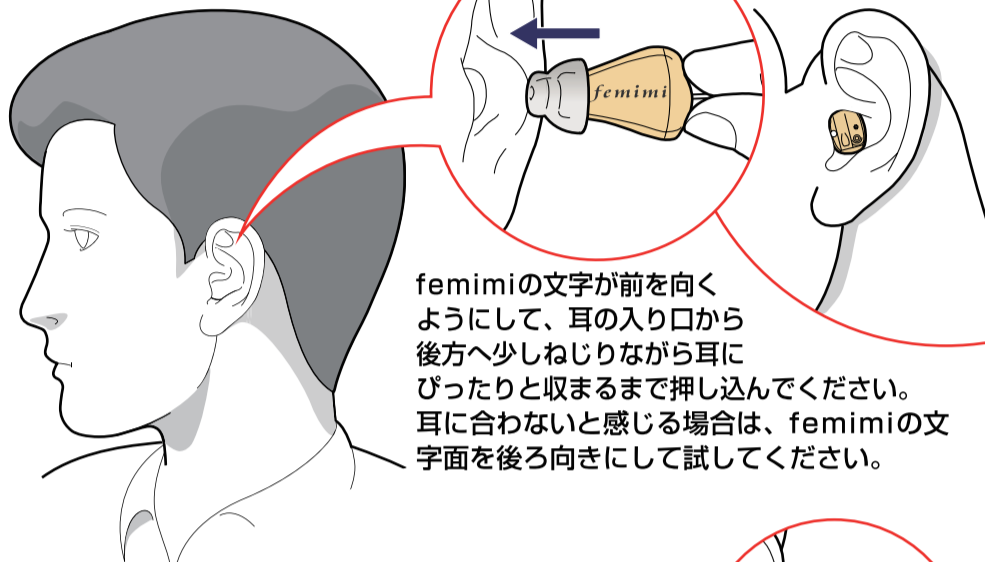


femimiの文字が前を向くようにして、耳の入り口から後方へ少しねじりながら耳にぴったりと収まるまで押し込んでください。耳に合わないと感じる場合は、femimiの文字面を後ろ向きにして試してください。

集音器は左耳、右耳どちらでも使用できます。


外す場合は、テグスと本体をつかんで、ゆっくり耳から引き出します。

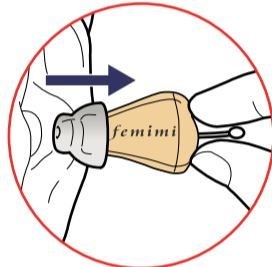


### ⑤ イヤーチップを軽く引っ張り、外れないことを確認する

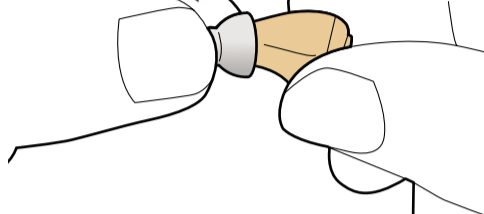

正しく取り付けられていないと、耳の中にイヤーチップが残ってしまうことがあります。このような場合は、ご自分では取り出さず、ご自分で医師にご相談ください。

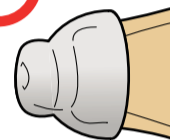


### 電池の入れ方

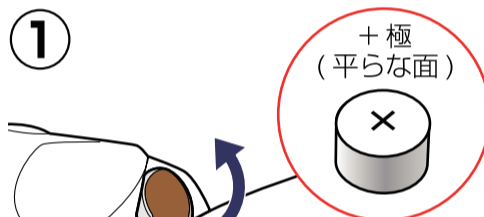


#### ① 電池のシールをはがして、2～3分放置する



空気電池は+極に酸素を取り入れる必要があります。電池をご使用になるまでは、シールをはがさないでください。シールをはがした場合、使用しなくても電池寿命は短くなります。

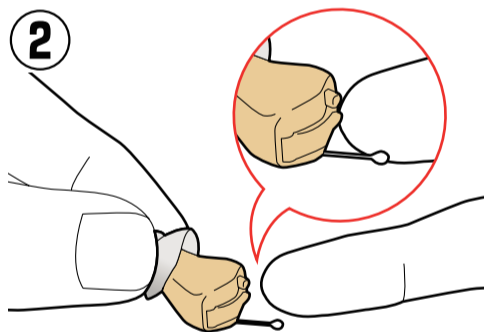


#### ② 電池ケースの出っ張りに指をかける

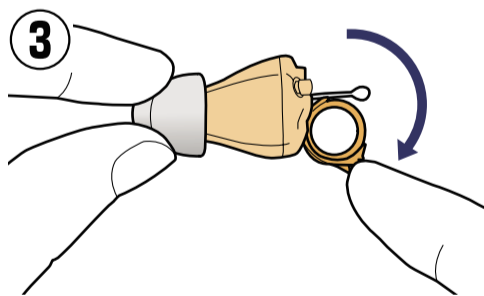

#### ③ 電池ケースを開く


電池ケースを外側に開き過ぎないようにご注意ください。

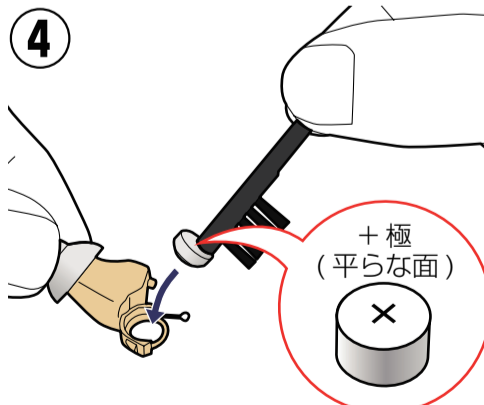

#### ④ お掃除ブラシの先端(磁石)を使って、電池を入れる



電池の向きを逆にすると、電池ケースが閉まらなくなったり破損する恐れがあります。

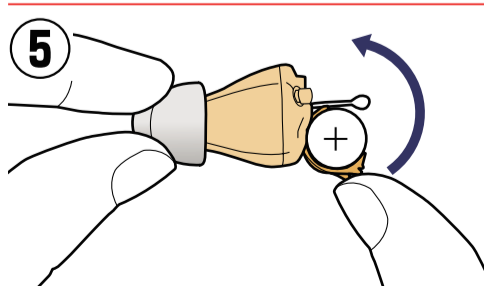


#### ⑤ 電池ケースを閉じる(約2秒後に自動的に電源が入ります)


電池ケースは最後までしっかりと閉じてください。

### イヤーチップの交換の仕方

ご購入時には、Mサイズのイヤーチップが装着されています。耳あなに合わない、音が聞こえにくい、またはピーピー音が出る場合は、イヤーチップを付属のSサイズ、またはLサイズに交換してください。また、イヤーチップは消耗品です。定期的に新しいイヤーチップに交換してください。(購入方法はサポートシートをご参照ください)

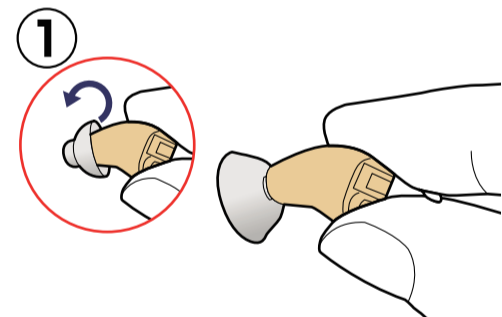


#### ① イヤーチップの傘の部分を裏返す

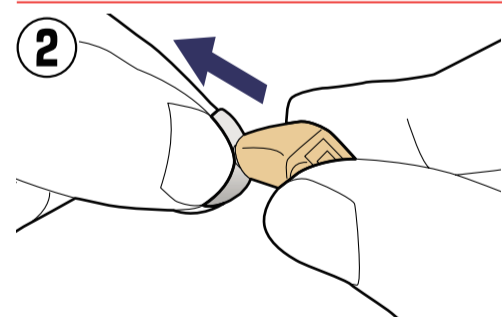


#### ② 根元を持ち、そのまま引っ張って外す



傘の部分は薄いため、引っ張らないでください。破損する可能性があります。

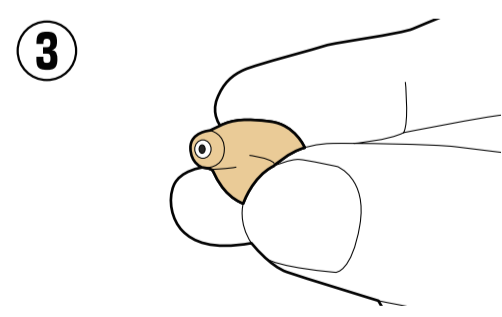


#### ③ 本体を、利き手で持つ

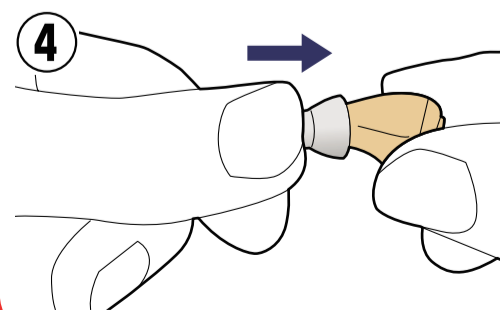

#### ④ もう一方の手で交換するイヤーチップを持ち、親指で押し込む


イヤーチップをまっすぐ挿入しながら、ゆっくり奥まではめ込んでください。

## 使い方

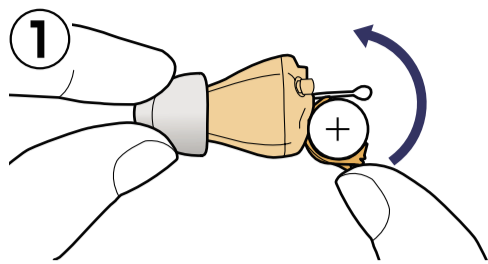


### 電源を入れる

電池ケースを閉めると、自動的に電源が入ります。  
 ・電源を入れた直後の音量は、「音量 1」（最小）です。

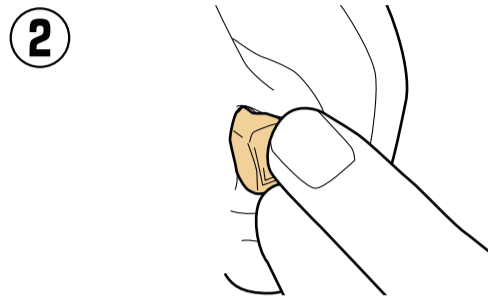

### 集音器を耳に入れる


☞「耳への着け方・外し方」をご参照のうえ、耳に入れてください。

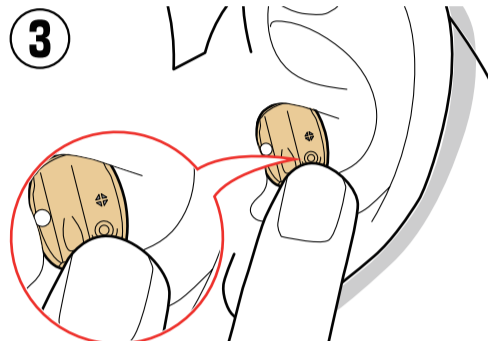

### 音量を選択する


音量選択ボタンを押すたびに、音量が 1 → 2 → 3 → 4（以降繰り返し）と選択できます。

| 音量 | お知らせ音（回数） |
|----|-----------|
| 1  | ピッ（1回）    |
| 2  | ピッ（2回）    |
| 3  | ピッ（3回）    |
| 4  | ピッ（4回）    |

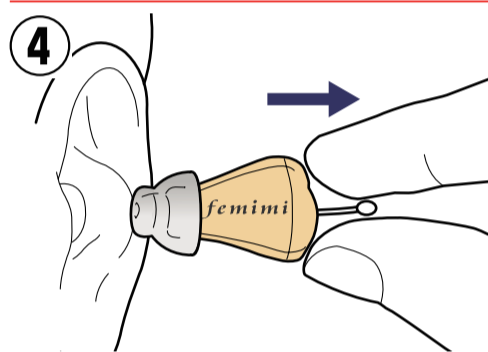


### 集音器を外す


☞「耳への着け方・外し方」をご参照のうえ、取り外してください。

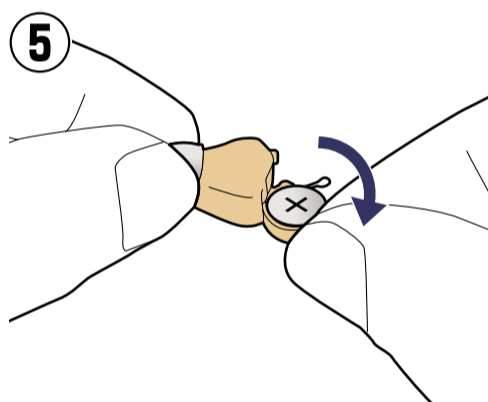

### 電池ケースを開き、電源を切る

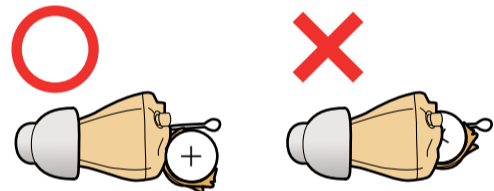

電池ケースを完全に開かないと電源が切れない場合があります。

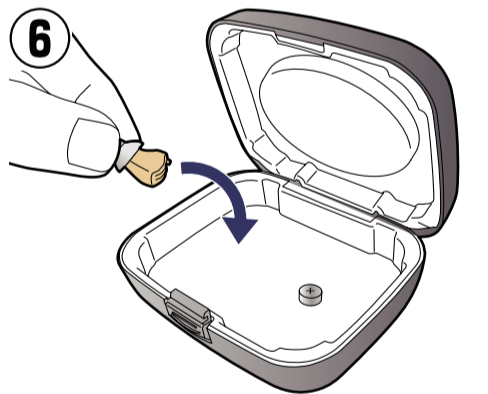

### 収納ケースに入れて保管する

**警告**  
 電池の消耗を抑えるために、使用後は必ず電池を取り外して保管してください。空気電池は、小さなお子様が誤って飲み込むと大変危険です。お子様の手の届かない所へ保管してください。万一飲み込んだ可能性がある場合、ただちに医師に相談してください。

## 電池寿命お知らせ機能

電池残量が少なくなってくると、電子音（ピピッ、ピピッ、ピピッ）が約 8 分おきに鳴り、最終的に電子音（ピピッ）が 6 回鳴ると電源が自動的に切れます。電子音が鳴りましたら、必ず新しい電池に交換してください。




- 電池寿命は連続使用で約 165 時間です。使用条件によって異なる場合があります。また、付属のお試用電池は電池寿命が短い場合があります。
- 電池のシールをはがした場合、使用しなくても電池寿命は短くなります。一度シールをはがした電池は、使用しなくても約 1 か月を目安に交換してください。

## お手入れについて

集音器はいつも清潔にしておいてください。ご使用後は付属のお掃除ブラシで耳あかを取り除き、ティッシュペーパーなどで油分や湿気を拭き取って、いつも乾燥した状態にして保管してください。

- 集音器を水や他の液体に浸したり、シンナー、ベンジンまたは濡れた布で拭くなどのことは、故障の原因となりますので絶対に避けてください。
- 耳あかについて：ほんの少しの耳あかでも、集音器の機能に影響を与えます。時々、耳鼻咽喉科を受診し、耳の中をきれいにしてもらうことをお勧めします。

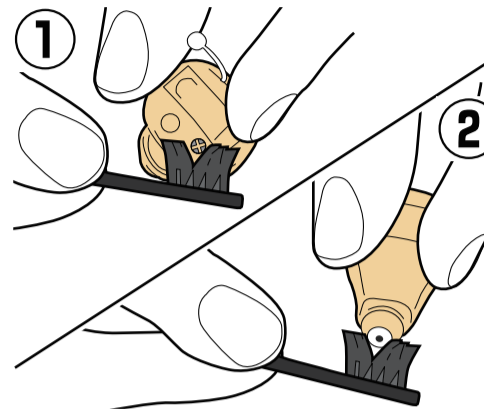


① 音の入口をお掃除ブラシでお手入れする

② 音の出口をお掃除ブラシでお手入れする

必ず清掃面を下に向けて掃除してください。



## 耳あかガードの交換方法

耳あかガードは 3 か月に一度を目安にお取り替えください。一度利用した耳あかガードは再利用しないでください。脱落する危険性があります。

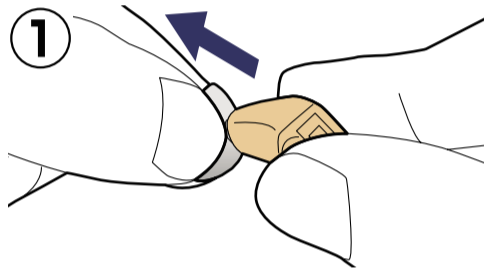


### イヤータップを外す

☞「イヤータップの交換の仕方」をご参照のうえ、取り外してください。

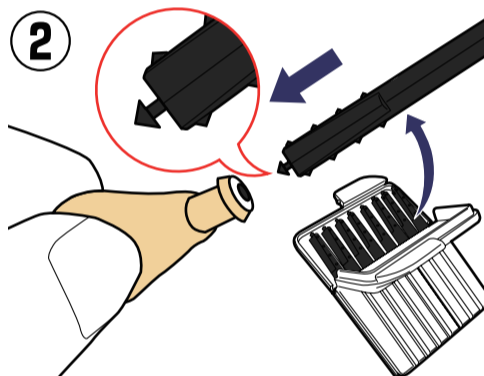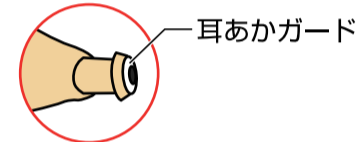


② 耳あかガードホルダーの「取り外しフック側」を、集音器の耳あかガードに差し込む


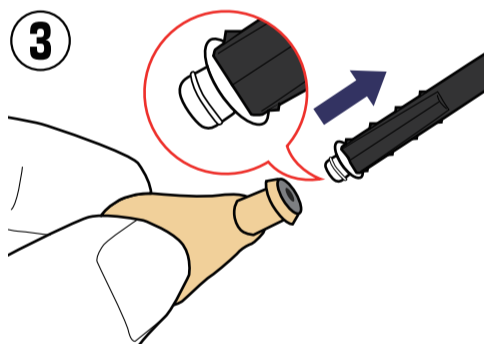


③ 耳あかガードホルダーをまっすぐ引き抜く

ホルダーに使用済みの耳あかガードがくっついて外れます。

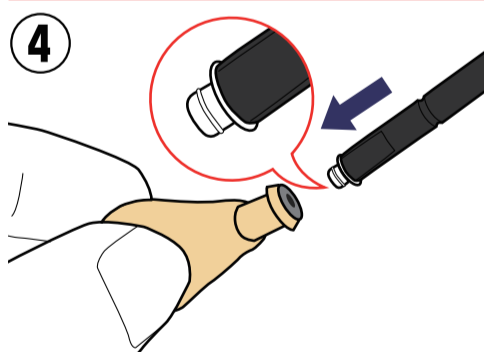


④ 耳あかガードホルダーをひっくり返し、新しい耳あかガードを集音器に押し込む

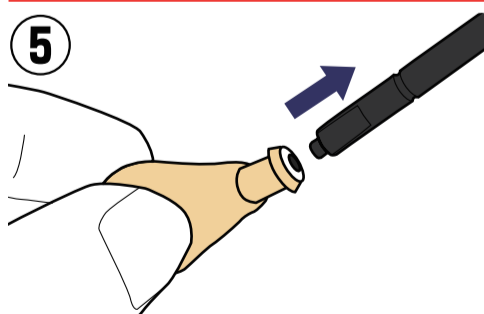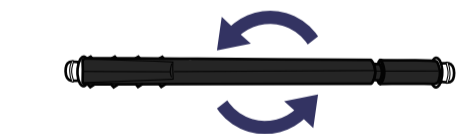

⑤ 耳あかガードホルダーをまっすぐ引き抜く

集音器に新しい耳あかガードが装着されます。

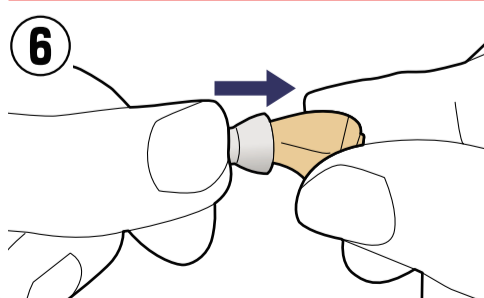

### イヤータップをはめる

☞「イヤータップの交換の仕方」をご参照のうえ、取り外してください。

**強制**  
 集音器をご使用になる前に、耳あかガードが正しく取り付けられているか確認してください。